



RIC (Receptor en el canal)

MANUAL DE OPERACIONES



Receptor en el canal



Visión General	
Características, controles e identificación	2
Preparación	
Pilas	4
Indicadores de la pila	6
Colocar y Retirar	
Adaptador de adaptación instantánea	8
Adaptador hecho a medida	9
Operación	
Encendido y apagado	10
Ajustes de multimemoria	11
Ajustes direccionales	12
Uso del teléfono	13
Función T ² (marcación por tonos)	16
Auto Revisión	18
Recordatorio	19
Resumen de ajustes	20
Cuidado del sistema auditivo	
Cuidado del instrumento	22
Servicio y reparación	24
Guía para la solución de problemas	25
Consejos para una mejor comunicación	
Para usted	26
Para su familia y amigos	27
Información de la FDA	
Información requerida	28

Visión General


Características, controles e identificación

Los controles de su sistema auditivo incluyen:

1. Instrumento auditivo
2. Cable
3. Receptor
4. Micrófono(s)
5. Botón multimemoria
6. Compartimiento de pila
(control de encendido/apagado)
Número de serie
7. Cierre de retención
8. Nombre del fabricante y modelo
9. Indicador de lado izquierdo/derecho
10. Adaptador de adaptación instantánea
11. Molde hecho a medida (opcional)
12. Molde hecho a medida para RIC Power
(opcional)

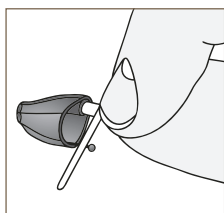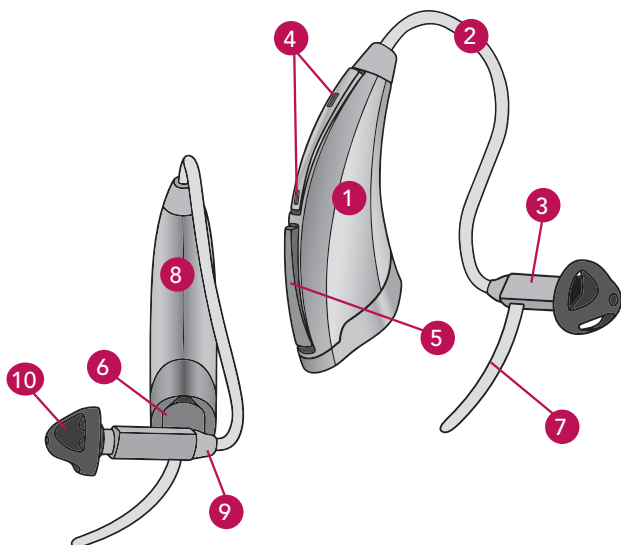

11

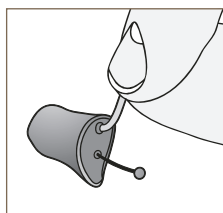

12


Preparación

Pilas


Su sistema auditivo utiliza una pila como fuente de energía. Este tamaño de pila se identifica por el código de color marrón (312) en el estuche de presentación.

Para colocar o reemplazar la pila:


1. Utilice la agarradera de uña de la portapila.
2. Retire la etiqueta de la pila nueva.
3. Abra suavemente la portapila y retire la pila usada.
4. Haga coincidir el signo de "+" de la pila (el lado plano de la pila) con el signo "+" en la portapila.
5. Cierre la portapila

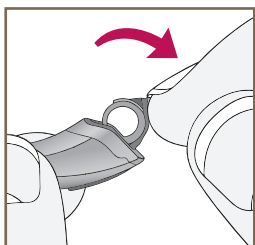


1

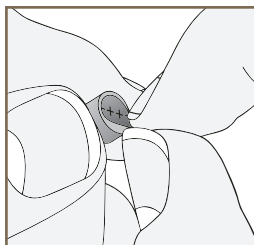


2

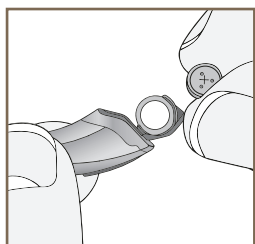

3

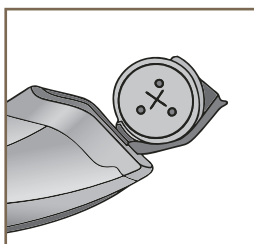

4

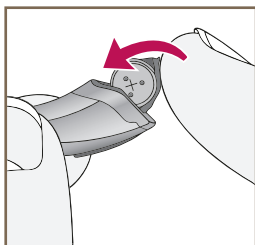

5

Preparación

Indicadores de la pila

Un indicador sonará cuando el voltaje de la pila esté bajo. Tiene 10 minutos* aproximadamente para reemplazar la pila. Un indicador diferente sonará antes que la pila deje de funcionar.

** La hora real entre el indicador de pila baja y la señal de apagar variará dependiendo de los niveles de ruido de ambiente y marca de pila utilizada.*





Consejos útiles

- NUNCA FUERCE LA PUERTA PARA CERRARLA; cerrar la puerta con fuerza puede dañar el instrumento auditivo; si la puerta no cierra firmemente, verifique que la posición de la pila sea la correcta
- No abra la puerta de la pila demasiado porque se puede causar daño al instrumento auditivo
- Deseche las pilas usadas inmediatamente en un recipiente de basura o reciclaje apropiados

- Debido a que el desempeño y el tamaño de las pilas puede variar, su profesional del cuidado de la audición es su mejor fuente para calcular la vida estimada de la pila y verificar si está utilizando el tipo y tamaño apropiados

Advertencias

Las pilas son peligrosas si son ingeridas. Para impedir la ingestión accidental de las pilas:

-  Mantenga las pilas fuera del alcance de niños y mascotas
-  Siempre revise sus medicamentos antes de ingerir. Es posible confundir sus píldoras con sus pilas
-  Nunca ponga las pilas en su boca ya que pueden ser fácilmente ingeridas sin querer
-  Línea de emergencia en los Estados Unidos para ingestión de pilas: 202-625-3333

Colocar y Retirar

Colocar y retirar el adaptador de adaptación instantánea




Para colocar el adaptador de adaptación instantánea

1. Sostenga el cable entre sus dedos pulgar e índice por la curva superior en frente del receptor. Suavemente coloque el receptor dentro del canal auditivo.
2. Coloque el instrumento auditivo cuidadosamente detrás del oído envolviéndolo sobre la parte superior de su oído.
3. Coloque el seguro dentro de la concha de su oído

Para retirar el adaptador de adaptación instantánea

1. Retire el cierre de retención de la concha de su oído.
2. Retire el instrumento auditivo desde atrás del oído.
3. Tome el receptor entre sus dedos pulgar e índice. Suavemente retírelo del canal auditivo




No lo retire jalando la caja del sistema auditivo porque esto podría dañar la conexión

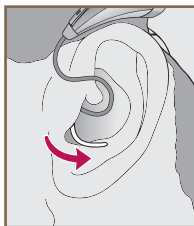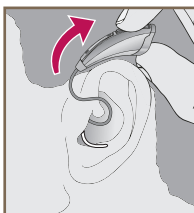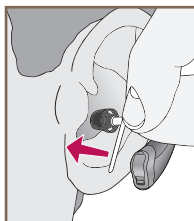

Colocar y retirar el adaptador hecho a medida


Para colocar el adaptador hecho a medida

1. Sostenga el cable entre sus dedos pulgar e índice por la curva superior en frente del receptor. Suavemente coloque el receptor dentro del canal auditivo.
2. Coloque el instrumento auditivo cuidadosamente detrás del oído envolviéndolo sobre la parte superior de su oído.
3. Coloque el seguro dentro de la concha de su oído.

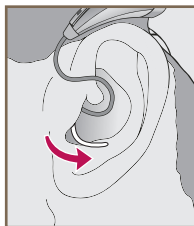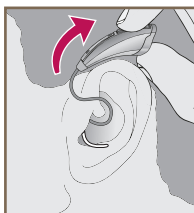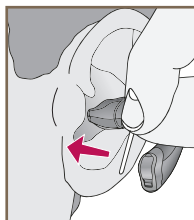

Para retirar el adaptador hecho a medida

1. Retire el cierre de retención de la concha de su oído.
2. Retire el instrumento auditivo desde atrás del oído.
3. Tome el receptor entre sus dedos pulgar e índice. Suavemente retírelo del canal auditivo.

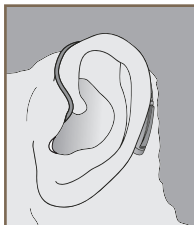

No lo retire jalando la caja del sistema auditivo porque esto podría dañar la conexión

Operación

Consejos útiles

- Es probable que el oído sufra de algún caso de irritación e inflamación menor mientras se acostumbra a llevar un objeto dentro; si su problema persiste, consulte con su profesional del cuidado de la audición.
- Si una reacción alérgica real ocurre, materiales alternativos de moldes están disponibles; comuníquese con su profesional del cuidado de la audición.
- Hinchazón severa, pus del oído, cerumen excesivo, u otra condición inusual justifica atención médica de inmediato.

Encendido y apagado

Para ENCENDER:


Coloque una pila y cierre la portapila.

Para APAGAR:

Abra la portapila hasta que la pila no esté tocando los contactos de la pila.

Ajustes de multimemoria

Su profesional del cuidado de la audición puede instalar hasta cuatro programas auditivos para usted. Se puede acceder a estos programas adicionales al presionar el botón multimemoria interior.

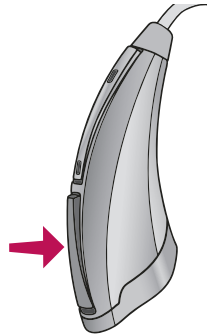

Cuando presione el botón multimemoria, podría escuchar un indicador de habla o una serie de tonos indicando que el dispositivo ha cambiado al programa siguiente. Su instrumento auditivo ha sido programado con los siguientes indicadores y ambientes:

Programa	Tono	Habla	Ambiente
1	1 Tono	"Uno"	Normal
2	2 Tonos	"Dos"	
3	3 Tonos	"Tres"	
4	4 Tonos	"Cuatro"	

Operación

Ajustes direccionales

Su sistema auditivo tiene micrófonos direccionales para ayudar a mejorar la comprensión del habla en situaciones ruidosas.

Su sistema auditivo ha sido programado con los siguientes ajustes direccionales:

Programa	Ajuste direccional		
1	Automático	Manual	Apagado
2	Automático	Manual	Apagado
3	Automático	Manual	Apagado
4	Automático	Manual	Apagado

Cuando los micrófonos direccionales son activados automáticamente (automático), el instrumento auditivo observará continuamente el ambiente y gradualmente se ajustará al modo apropiado para optimizar la comprensión del habla. Cuando los micrófonos direccionales son activados al presionar el botón multimemoria (manual), el instrumento auditivo optimiza el habla cuando usted selecciona la memoria direccional.

Pregunte a su profesional del cuidado de la audición acerca de sus ajustes direccionales.

Uso del teléfono

Su sistema auditivo tiene una característica de teléfono que le permite utilizar cómodamente el teléfono sin retirar su instrumento auditivo.

Mi característica de teléfono es:

- Respuesta Automática de Teléfono (ATR)
- Telebobina automática (Autocoil)
- Telebobina manual (Programa # _____)

ATR o Autocoil:

Coloque el auricular del teléfono en una posición normal y luego muévelo ligeramente hacia atrás. Cuando esté en la posición correcta, usted escuchará un indicador para la activación automática del programa de teléfono. Cuando termine, el sistema auditivo regresará automáticamente al ajuste anterior.

Operación

Telebobina y cambio manual



Los instrumentos auditivos con telebobina manual le permiten cambiar los dispositivos al modo de teléfono cuando sea necesario.

Las telebobinas con interruptor manual son activadas al escoger el ajuste de telebobina usando el botón multimemoria.



Uso general del teléfono

Algunos instrumentos auditivos funcionan mejor al sostener el teléfono cerca, pero no cubriendo totalmente su oído. En algunos casos, si usted encuentra un silbido (retroalimentación), incline el receptor a un ángulo hasta que el silbido pare. Su profesional de la audición puede darle instrucciones y técnicas para sus necesidades específicas.

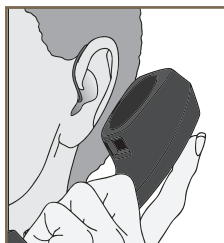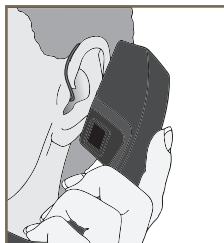

Algunos usuarios de instrumentos auditivos han informado de un zumbido en sus instrumentos auditivos cuando están utilizando sus celulares, indicando que el celular y el instrumento auditivo no son compatibles. De acuerdo a los estándares de la ANSI C63.19 (ANSI C63.19-2006, Métodos estándares nacionales americanos de medida de compatibilidad entre dispositivos de comunicación inalámbricos e instrumentos auditivos), la compatibilidad de un instrumento auditivo particular y un teléfono celular puede ser prevista al añadir el nivel de inmunidad del instrumento auditivo al nivel de inmunidad del teléfono celular. Por ejemplo, la suma del nivel de inmunidad de un instrumento auditivo de 2 (M2) y el nivel de inmunidad de un teléfono de 3 (M3) resultaría en un nivel de inmunidad de 5. Cualquier nivel de inmunidad combinado que iguale al menos a 5 proporcionaría un "uso normal"; un nivel de inmunidad de 6 o mayor indicaría un "desempeño excelente".

El nivel de inmunidad de este instrumento auditivo es al menos M2. Las medidas de desempeño del equipo, categorías y clasificación del sistema están basadas en la mejor información disponible pero no pueden garantizar que todos los usuarios estarán satisfechos.

NOTA: El desempeño de instrumentos auditivos individuales puede variar con teléfonos celulares particulares. Por eso, por favor pruebe este instrumento auditivo con su teléfono celular o, si está comprando un nuevo teléfono, asegúrese de probarlo con su instrumento auditivo antes de realizar la compra. Para orientación adicional, por favor consulte con el proveedor de su teléfono celular por el folleto titulado "Compatibilidad del audífono con teléfonos celulares digitales inalámbricos" ("Hearing Aid Compatibility with Digital Wireless Cell Phones").

Operación



Función T² (marcación por tonos)

- Mi instrumento auditivo tiene la capacidad T². Por favor lea la sección a continuación.
- Mi instrumento auditivo no tiene la capacidad T². Vea la página 18.

Puede utilizar un celular, teléfono inalámbrico, o teléfono con cable para ajustar su instrumento auditivo. El teléfono tiene que emitir "beeps" cuando se presionan las teclas. Si su teléfono no hace un "beep" cuando se presionan los botones, consulte su manual de operación de teléfono o contacte su proveedor de servicios de teléfono.

- Sostenga el teléfono aproximadamente a 3 pulgadas del oído
- Presione ** para "activar" T² (una serie de tonos indica que está listo para recibir un comando)
- Presione la tecla del teléfono que corresponde a la función deseada
- T² se "desactivará" después de 20 segundos

Utilice los siguientes botones del teclado para activar a distancia los ajustes del instrumento auditivo.

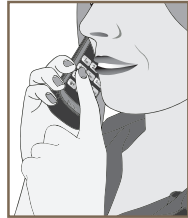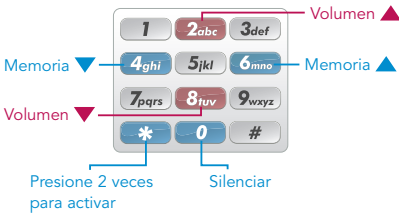

Guía para la solución de problemas

SÍNTOMA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES
El sistema auditivo no responde al comando del teléfono	Las teclas del teléfono no emiten tonos "beep"	Consulte el manual de operaciones del teléfono para activar los tonos "beep"
	T ² no fue activado antes del comando	Presione ** y escuche el indicador único de T ²
	Teléfono demasiado lejos del sistema auditivo	Acerque más el teléfono al micrófono del sistema auditivo
	Comando de clave incorrecto	Presione ** para activar y después presione 2 ú 8 para aumentar o disminuir el volumen o 4 ó 6 para cambiar programas si el dispositivo tiene múltiples programas
El instrumento auditivo respondió pero no responde al último comando	T ² automáticamente se "desactiva" 20 segundos después del último comando	Presione ** para activar y después presione la tecla que corresponde a la acción deseada

Operación

Auto Revisión

Algunos sistemas auditivos pueden iniciar una prueba de diagnóstico de su propio desempeño. Esta característica se llama Auto Revisión. Su profesional del cuidado de la audición marcará la casilla debajo si esta característica está activada.

Mi característica de Auto Revisión está activada.

Mi indicador de Auto Revisión es un:

Indicador de Habla ("Bien"/"Hacer cita")

Indicador de tono

Para realizar la Auto Revisión:

1. Abra y cierre la portapila tres veces.
2. Coloque el sistema auditivo en su oído.
3. Escuche el indicador de estado.
4. Programe una cita con su profesional del cuidado de la audición, si es necesario.

Recordatorio

Algunos sistemas auditivos han sido programados con un recordatorio indicando que es tiempo de programar una cita. Su profesional del cuidado de la audición marcará la casilla debajo si esta característica está activada.

Mi característica de Recordatorio está activada

 Mi indicador de Recordatorio es un:

Indicador de Habla ("Hacer cita")

Indicador de tono

El recordatorio ocurrirá automáticamente. Cuando escuche el indicador de recordatorio, por favor comuníquese con su profesional del cuidado de la audición.

Operación

Resumen de ajustes

	Ambiente	Ajuste direccional
Programa 1	Normal	<input type="checkbox"/> Apagado <input type="checkbox"/> Automático <input type="checkbox"/> Manual
Programa 2		<input type="checkbox"/> Apagado <input type="checkbox"/> Automático <input type="checkbox"/> Manual
Programa 3		<input type="checkbox"/> Apagado <input type="checkbox"/> Automático <input type="checkbox"/> Manual
Programa 4		<input type="checkbox"/> Apagado <input type="checkbox"/> Automático <input type="checkbox"/> Manual
Pila baja	—	—
Fin de duración de la pila	—	—
Auto Revisión	—	—
Recordatorio	—	—
Control de volumen	—	—

Indicador encendido	Tipo de indicador
<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Habla ("Uno") <input type="checkbox"/> 1 Tono
<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Habla ("Dos") <input type="checkbox"/> 2 Tonos <input type="checkbox"/> Serie de tonos
<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Habla ("Tres") <input type="checkbox"/> 3 Tonos <input type="checkbox"/> Serie de tonos
<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Habla ("Cuatro") <input type="checkbox"/> 4 Tonos <input type="checkbox"/> Serie de tonos
<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Habla ("Pila") <input type="checkbox"/> Serie de tonos
<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Habla ("Pila baja") <input type="checkbox"/> Tono sostenido
<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Habla ("Bien"/"Hacer cita") <input type="checkbox"/> Serie de tonos
<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Habla ("Hacer cita") <input type="checkbox"/> Serie de tonos
<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> CV óptimo <input type="checkbox"/> CV mínimo <input type="checkbox"/> CV máximo <input type="checkbox"/> Serie de tonos

Cuidado del sistema auditivo

Cuidado del instrumento

Haga todo lo posible para mantener sus instrumentos auditivos limpios en todo momento. El calor, la humedad y sustancias extrañas pueden afectar la operación del instrumento auditivo.

- Utilice el cepillo de limpieza o una toalla suave para limpiar la suciedad alrededor de los interruptores, micrófono y compartimiento de pila; revise el receptor, adaptador de adaptación instantánea/molde hecho a medida y el protector de cerumen (Wax Guard) regularmente.
- Nunca utilice agua, solventes, líquidos de limpieza o aceite para limpiar su instrumento

Su profesional del cuidado de la audición puede proporcionarle más información sobre procedimientos de mantenimiento adicional para su sistema auditivo si lo necesita.

Consejos útiles

- Cuando no esté utilizando su sistema auditivo, abra la portapila para permitir que se evapore la humedad
- Cuando no lo esté utilizando, retire las pilas totalmente; coloque su sistema auditivo en el recipiente de almacenamiento y guárdelo:
 - En un lugar seguro y seco
 - Lejos de la luz directa del sol o el calor para evitar temperaturas extremas
 - En un lugar que le sea fácil encontrar
 - Fuera del alcance de los niños y las mascotas
- No desarme sus instrumentos auditivos ni inserte las herramientas de limpieza dentro de ellos

Cuidado del sistema auditivo

Servicio y reparación

Si por alguna razón, su sistema auditivo no funciona apropiadamente, no trate de repararlo. No solo puede revocar la garantía y/o el seguro del instrumento, sino también puede fácilmente causarle daño permanente.

Si su sistema auditivo le falla o no está satisfecho con el rendimiento, por favor revise la guía de sugerencias en la siguiente página. Si su problema continúa, comuníquese con su profesional del cuidado de la audición. Él o ella tienen la capacitación para poder resolver la mayoría de los problemas de sus instrumentos auditivos en su oficina o clínica.

Cuidado del sistema auditivo

Guía para la solución de problemas

SÍNTOMA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES
No tiene suficiente volumen	Pila baja	Reemplace la pila
	Molde, tubo o adaptador obstruidos	Limpie o reemplace el protector de cerumen (Wax Guard) cuando sea necesario
	Cambio auditivo	Contacte a su profesional del cuidado de la audición
	Acumulación de suciedad	Limpie el micrófono y el receptor con un cepillo
Desempeño inconsistente	Pila baja	Reemplace la pila
	Molde, tubo o adaptador obstruidos	Limpie o reemplace el protector de cerumen (Wax Guard) cuando sea necesario
Sonido distorsionado y poco claro	Pila baja	Reemplace la pila
	Molde, tubo o adaptador obstruidos	Limpie o reemplace el protector de cerumen (Wax Guard) cuando sea necesario
	Instrumento auditivo defectuoso	Contacte a su profesional del cuidado de la audición
Muerto	Pila baja	Reemplace la pila
	Molde o tubo obstruidos	Limpie o reemplace el protector de cerumen (Wax Guard) cuando sea necesario
	Tubo rizado	Contacte a su profesional del cuidado de la audición

Consejos para una mejor comunicación

Su profesional del cuidado de la audición le recomendará un horario apropiado para ayudarlo a adaptarse a su nuevo sistema auditivo. Tomará práctica, tiempo y paciencia para su cerebro adaptarse a los nuevos sonidos que proporciona su sistema auditivo. El oír es solo una parte en el intercambio de pensamientos, ideas y sentimientos. Leer los labios, expresiones y gestos de otros puede ayudarlo en el proceso de aprendizaje y añadir algo a lo que la amplificación puede omitir.

Por favor revise los siguientes consejos simples de comunicación:

Para usted

- Acérquese y mire a la persona que está hablando
- Siéntese cara a cara en un ambiente silencioso
- Pruebe diferentes asientos para encontrar el mejor lugar para escuchar
- Minimice distracciones
- Los ruidos de fondo pueden ser frustrantes al inicio; recuerde, usted no los ha escuchado por un tiempo
- Comunique a otros lo que usted necesita; recuerde que la gente no puede "ver" su pérdida auditiva

Consejos para una mejor comunicación

- Desarrolle expectativas realistas de lo que sus instrumentos auditivos pueden y no pueden hacer
- Una mejor audición con instrumentos auditivos es una habilidad a aprender que combina deseo, práctica y paciencia

Para su familia y amigos

Su familia y amigos son afectados también por su pérdida auditiva. Solicíteles:

- Conseguir toda su atención antes de empezar la conversación
- Que lo miren o se sienten frente a frente en un ambiente silencioso
- Que le hablen claro y a un nivel normal; gritar puede realmente hacer más difícil el entender
- Que reestructuren lo que están diciendo y no repitan lo mismo una y otra vez; es más fácil entender una palabra diferente
- Minimizar distracciones cuando le estén hablando

Información requerida

La siguiente información es proporcionada de acuerdo a las regulaciones de la Administración de Alimentos y Drogas de los EE.UU. (FDA):

ADVERTENCIA A LOS DISTRIBUIDORES DE INSTRUMENTOS AUDITIVOS. Un distribuidor de aparatos auditivos debería aconsejar a un posible usuario que consulte inmediatamente a un médico autorizado (de preferencia un especialista en enfermedades del oído) antes de proporcionar un instrumento auditivo si el distribuidor de instrumentos auditivos determina a través de una evaluación, observación directa, o mediante otra información disponible que es posible que el usuario tenga una de las siguientes condiciones:

- i. Deformidad visible congénita o traumática del oído.
- ii. Supuración del oído medio en los últimos 90 días.
- iii. Pérdida de la audición repentina o progresiva en los últimos 90 días.
- iv. Mareo agudo o crónico.
- v. Pérdida auditiva unilateral inmediata o reciente, en los últimos 90 días.
- vi. Gap aéro-ósea audiométrica igual o mayor de 15 decibeles a 500, 1,000 y 2,000 Hz
- vii. Acumulación significativa de cerumen o algún cuerpo extraño en el oído.
- viii. Incomodidad o dolor dentro del oído.

NIVEL DE INMUNIDAD RF. Este instrumento auditivo tiene un nivel de inmunidad de M3/T3. Un teléfono celular compatible con un instrumento auditivo debe tener un nivel de inmunidad de M2 o más alto para funcionar con este instrumento auditivo. Por favor consulte las especificaciones de su teléfono celular para averiguar su rango de inmunidad.

INFORMACIÓN IMPORTANTE A LOS FUTUROS USUARIOS DE INSTRUMENTOS AUDITIVOS. La buena salud requiere que personas con una pérdida auditiva visiten a un médico autorizado (preferiblemente un doctor especializado en enfermedades del oído) para una evaluación completa antes de comprar un instrumento auditivo. Médicos autorizados, especializados en enfermedades del oído, generalmente son Otolaringólogos, Otólogos u Otorrinolaringólogos. El propósito de la evaluación médica es asegurar que se han identificado todas las condiciones que pueden afectar su audición antes de comprar un instrumento auditivo.

Después de la evaluación, el médico certificará por escrito que su audición ha sido evaluada y que usted puede ser un candidato para un instrumento auditivo. El médico lo refiere a un profesional de la audición si es necesario, y el especialista examinará la audición.

El especialista revisará su audición para ver cómo responde con y sin instrumento auditivo. Esta evaluación le indica al profesional de la audición la seriedad de su pérdida y se encarga de seleccionar y adaptar un instrumento auditivo específico para su necesidad auditiva.

Si usted tiene dudas en cuanto a la capacidad de adaptarse a un instrumento auditivo, solicite información sobre algún período de prueba antes de comprar uno. Varios profesionales de la audición tienen programas que le permiten usar un instrumento auditivo durante un período de tiempo por un bajo costo nominal. Tiene la opción de comprar el instrumento, si le gusta como amplifica, después de su período de prueba.

La ley Federal restringe la venta de instrumentos auditivos a aquellos individuos que han obtenido una evaluación médica de un médico autorizado. La Ley Federal le permite a un adulto completamente informado firmar un documento rechazando la evaluación médica debido a creencias religiosas o personales que le impiden consultar a un médico. El ejercer este tipo de acción no es lo más recomendable para su salud y no se recomienda su uso.

El instrumento auditivo no va a restaurar su audición a lo que era antes de su pérdida y tampoco puede prevenir o mejorar una discapacidad auditiva causada por condiciones orgánicas. En la mayoría de casos el utilizar su instrumento con poca frecuencia lo privará de obtener el máximo beneficio.

NIÑOS CON PÉRDIDA AUDITIVA. Además de consultar con un médico para una evaluación, tiene que consultar con un audiólogo para una evaluación y rehabilitación puesto que la pérdida auditiva puede causar problemas en el desarrollo de lenguaje y el crecimiento social y educativo del niño. Un audiólogo está calificado mediante su entrenamiento y experiencia para asistir en la evaluación y rehabilitación de niños con pérdida auditiva.

Starkey World Headquarters

6700 Washington Avenue South
Eden Prairie, MN 55344

Wm. F. Austin House, Bramhall Technology Park
Pepper Road, Hazel Grove, Stockport SK7 5BX
United Kingdom

www.starkey.com



Experimente más.

Una compañía internacional de
tecnología auditiva con sede en
Eden Prairie, Minnesota, U.S.A.

Starkey Laboratories, Inc.
6700 Washington Avenue South
Eden Prairie, MN 55344-3476
800.328.8602

www.starkey.com